


Conditions pré-analytiques du prélèvement de Guthrie

ECHANTILLONS VALIDES



ECHANTILLONS NON CONFORMES

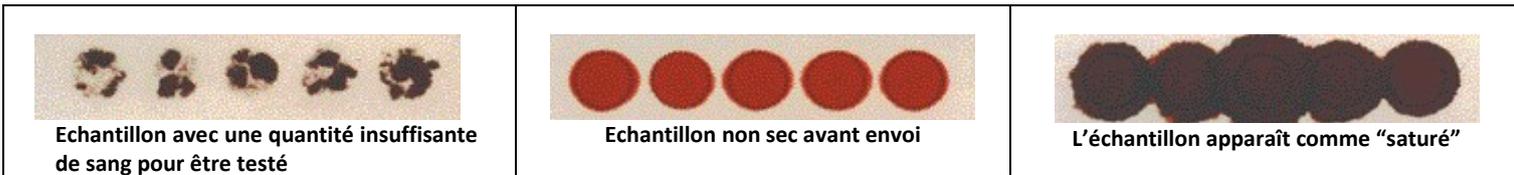

Echantillon avec une quantité insuffisante de sang pour être testé

Echantillon non sec avant envoi

L'échantillon apparaît comme "saturé"

Tous les items présents sur le buvard, **recto et verso**, doivent obligatoirement être remplis. Un seul item maquant **entraîne la non-conformité du pré-analytique selon la norme NF EN ISO 15189** :

- 1- L'identification du patient : identité absente ou incomplète, absence du nom de la mère, absence des date et heure de naissance, du sexe, demandes simultanées identiques, etc...
- 2- La prescription : absence du service demandeur, absence de renseignements cliniques (terme en SA, poids de naissance en g, transfusion, lieu de prélèvement, etc...)
- 3- L'échantillon : taches de sang non conformes, absence des date et heure du prélèvement, buvard périmé (cf. ci-dessus différents types de non-conformités de l'échantillon)
- 4- Le consentement parental écrit pour le test génétique éventuel

- 5- Le transport : hors délai, erreur d'acheminement, perte de l'échantillon etc.

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

PROGRAMME NATIONAL DE DÉPISTAGE NEONATAL

Necker Université Paris Cité

ENVOI MEDICAL URGENT

PRIO

20 g validité permanente

4 supports Maxi

CENTRE REGIONAL DE DEPISTAGE NEONATAL
ILE DE FRANCE
AUTORISATION 61826
75742 PARIS CEDEX 15